


# フタバ鼓膜切開替刃刀 (PAT D.PAT.)

- ●フタバ鼓膜切開替刃刀の替刃はディスポ製品です。 (ディスポに適した経済的価格/NF700は1本単価が¥850)
- ●ブラック替刃(NF800/NF600)はハレーション防止効果があります。 (替刃式の鼓膜切開刀でブラック替刃のitemがあるのは当社製品のみです)
- ●簡便で確実な装着システム。(PAT./D.PAT)

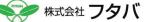





#### フタバ鼓膜切開替刃刀

#### 管理医療機器

●7種類の鼓膜切開替刃を揃え用途に合わせてご使用頂けます。

NF-800〈小〉ブラック細刃

NF-700〈小〉〈中〉〈大〉

NF-600 〈小〉 〈中〉 〈大〉ブラック刃

### フタバ鼓膜切開替刃刀専用ホルダー

- 一般医療機器 医療機器製造販売届品目番号 13B2X00001000003
- ●6種類の専用ホルダーを用意しています。

NF-1型 (ステンレスタイプ) 全長100mm

NF-2型(つや消しブラックホルダー)全長100mm

NF-5型 (チタン製・ブルーホルダー) 全長105mm

NF-6型(ステンレスタイプ)全長85mm

NF-7型(つや消しブラックホルダー)全長85mm

NF-8型(チタン製・ブルーホルダー)全長85mm

※専用ホルダーは便利なチャック方式の簡便、確実な装着が可能です。 フタバ鼓膜切開替刃刀のどの刃にもご使用になれます。

## フタバ鼓膜切開替刃刀/装着方法

- 1. フタバ鼓膜ホルダーのネジ部分をゆるめます。 (ネジをホルダー本体から外さない程度にゆるめてください。)
- 2. フタバ鼓膜切開替刃刀をホルダーの割りに合わせるようにして差し込みます。 深く入るまで入れてください。
- 3. フタバ鼓膜ホルダーのネジ部分をしめますと、鼓膜切開替刃刀をホルダー装着が 完了します。

#### 〔装着を外す場合〕

ホルダーネジ部分をゆるめ、鼓膜切開替刃刀をホルダーから抜きます。

